



INSTRUCCIONES DE USO  
e  
INSTRUCCIONES DE LAVADO

---

Para obtener más información, envíe un correo electrónico a [info@marenagroup.com](mailto:info@marenagroup.com)

[marena.com](http://marena.com)



INSTRUCCIONES DE LAVADO

---



Para obtener más información, envíe un correo electrónico a [info@marenagroup.com](mailto:info@marenagroup.com)

[marena.com](http://marena.com)

## Declaraciones del uso propuesto

Los productos de compresión de Marena® están indicados para soportar y comprimir una parte del cuerpo del paciente después de las siguientes cirugías.

1. Procedimientos quirúrgicos mamarios, entre ellos:
  - a. Mamoplastia de aumento
  - b. Mamoplastia de reducción
  - c. Reconstrucción mamaria
  - d. Mastectomía
  - e. Mastopexia (levantamiento mamario)
2. Liposucción
3. Lipoplastia
4. Lipoinyección
5. Braquioplastia
6. Abdominoplastia
7. Cirugías abdominales, entre ellas:
  - a. Histerectomía
  - b. Apendicectomía
  - c. Cesárea
8. Ginecomastia
9. Cirugías faciales y cirugías orales / maxilofaciales

## Contraindicaciones:

No utilizar si el paciente es sensible al Tactel Nylon™ o Lycra™

## Advertencias generales y precauciones:

Siga las instrucciones del proveedor de servicios médicos en cuanto a la toma de medidas, las tallas, y el uso de la prenda. La compresión excesiva puede conducir a necrosis cutánea, y puede ser un factor que contribuya al desarrollo de la trombosis venosa.

## Instrucciones de uso

La prenda se aplica directamente al paciente después de una cirugía. Por lo general, se usa de forma continua durante varias semanas, según las indicaciones del médico. Cada persona experimenta la sensación de compresión de manera diferente, pero, por lo general, la compresión no debe causar dolor. La prenda debe ajustarse cómodamente, pero usted debería poder deslizar un dedo por debajo de la tela. Se recomienda que el paciente reciba al menos dos prendas, por razones de comodidad e higiene.

Las prendas de Marena Recovery son diseñadas para brindar comodidad. Vea las instrucciones a continuación:

- Tenga cuidado de no dañar la tela con el filo de las uñas.
- Coloque la prenda de manera que la etiqueta que indica la talla en el interior se encuentre del lado de la espalda y hacia adentro.
- Abra los cierres o corchetes frontales.
- Coloque los tirantes en una posición intermedia.
- Tela 51 % Tactel® Nylon, 49 % Lycra®

**Si usa una faja enteriza, camiseta o malla**, introduzca una pierna a la vez mientras se pone la prenda. Tire de la prenda suavemente hacia el cuerpo. Acomode la apertura de la entrepierna mientras tira de la prenda hacia arriba. Cierre los corchetes uno por uno o suba el cierre hasta que la prenda se encuentre en la posición correcta, según corresponda. Como último paso, jale los tirantes hacia arriba y ajústelos.

**Si usa un sostén o chaleco**, deslice cada brazo por las mangas. Cierre los corchetes o el cierre que se encuentran en el frente; utilice la hilera del medio o la posición más cómoda al principio. Puede ajustar el cierre hasta encontrar la posición más cómoda. Luego de ajustar el cierre frontal, ajuste los tirantes para nivelarlos en la posición que sea más cómoda.

**Si usa una máscara facial**, coloque la barbilla en la copa para la barbilla (donde se encuentra la línea de costura vertical). Abroche el cierre de velcro que se encuentra por sobre la cabeza, a aproximadamente 2 in (5 cm) detrás de la frente. Abroche el cierre de velcro que se encuentra por detrás del cuello.

**Si usa una manga para brazos o pantorrillas**, abra la prenda en la parte más ancha y tire de ella, manteniéndola abierta, para deslizarla por sobre su pie o mano. Tire de la prenda suavemente hacia arriba por sobre el brazo o pantorrilla, y asegúrese de que la manga esté estirada de manera uniforme y sin pliegues sobre el miembro.

## Instrucciones de lavado:

Lave la prenda del revés con prendas de colores similares. No utilice suavizante para ropa ni blanqueador. No lave en seco ni planche la prenda.

## Instrucciones de conservación:

Evitar la humedad, el calor o el frío excesivos. Almacenar lejos de contaminantes atmosféricos, como los gases de motores de combustión interna. Almacenar en lugares protegidos de la luz del sol. Las condiciones de almacenamiento recomendadas son entre 4 a 29 °C (40 a 85 °F).

Para ver nuestra política de devolución, visite [www.Marena.com](http://www.Marena.com).

**Fecha de publicación:** 10 de febrero de 2023 (IFU-003 Rev.01)