



预期用途说明 和洗涤说明



欲了解更多信息, 请发送电子邮件至

info@marenagroup.com

marena.com

RECOVERY | SHAPE | **SPORT**

【产品名称】弹力绷带

【产品描述】比一般弹性绷带的弹力更高, 间接作用于创面, 捆绑到病人某个部位, 对其施加压缩力。非无菌提供, 可重复使用。

【适用范围】通过捆绑在病人四肢或其他部位上, 用于加压包扎, 达到消除腔隙、临时止血(非动脉止血)、保护手术切口等作用。

【备案人&生产企业】

名称: THE MARENA GROUP, LLC. 马林娜集团有限公司

住所: 650 Progress Industrial Blvd. Lawrenceville, GA 30043

生产地址: 650 Progress Industrial Blvd. Lawrenceville, GA 30043

联系方式: 888-462-7362

【型号】AB3F7, AB4F7, B01G, B15, B16, B19, BNRZ, FBA, FBBA, FBRs, FBS, FM100-A, FM100-B, FM100-C, FM300-C, FV2L, FVOM, FBBMSM, FM500, FVMK, FVMK, GFVM, ISB, ISBX, LGA, LGS, LW-LGA, LW-LGA2, LW-LGM, LW-LGM2, LW-LGS, LW-LGS2, MB, MV, NOA-003, NOA-007, NOA-015, NOA-109, NOA-123, NOA-147, NOA-153, NOA-155, NOA-157, NOA-310, NOA-510, NOA-513, NOA-900, NOA-901, NOA-902, PPGA, PPGS, SFBHM, SFBHM2, SFBHRM, SFBHRS, SFBHS, SFBHS2, SM

【备案号】国械备20200443号

【技术要求编号】国械备20200443号

【生产日期】:见标签

【有效期】5年

【说明书编制日期】2019年3月

产品名称:弹力绷带

型号 | 规格 | 生产日期: 见包装

有效期: 5年

生产企业名称: THE MARENA GROUP, LLC. 马林娜集团有限公司

生产企业住所

650 Progress Industrial Blvd., Lawrenceville, GA 30043

代理人&售后服务单位:北京捷通康诺医药科技有限公司

住所:北京市朝阳区朝阳门外大街20号1幢8层811B

联系方式:010-65889599

其他内容详见说明书

如果您有任何问题, 请在天猫平台<https://www.tmall.com/>的 Marena 海外旗舰店联系我们的客服。或者拨打客服热线: 025-58219811

预期用途说明

Marena® 压力产品的预期用途,是在以下手术后支撑和挤压患者身体的某一部分。

1. 乳房外科手术,其中包括:
 - a. 隆胸术
 - b. 缩胸术
 - c. 乳房再造术
 - d. 乳房切除术
 - e. 乳房固定术(提乳术)
2. 吸脂术
3. 脂肪成形术
4. 脂质注射术
5. 肱成形术
6. 腹部整形
7. 腹部手术,其中包括:
 - a. 子宫切除术
 - b. 阑尾切除术
 - c. 剖腹产
8. 男性乳房发育
9. 面部和口腔/颌面外科手术

禁忌症:

如果患者对 Tactel Nylon™ 或 Lycra™ 过敏,则不应使用

一般性警告和注意事项:

按照医疗服务提供者的指示来丈量、确定尺寸和穿着。挤压过度会导致皮肤坏死,并且可能是深静脉血栓的成因之一。

使用说明

服装在手术后直接用于患者。根据医生的指示,服装通常会连续穿数周。每个人对挤压的感觉都有所不同,但总的来说,挤压不应造成疼痛。您的服装应该很贴身,但是应该可以将一个手指探入织物下面。为了舒适和卫生起见,建议为患者至少提供两件服装。

Marena Recovery 服装设计舒适。请看以下说明:

- 当心不要让锐利的指甲刺穿织物。
- 将服装摆正,让内部尺寸标签位于服装的背面和里边
- 打开拉链和/或前面的搭钩和搭扣的调节扣
- 将肩带调到中间位置
- 织物 51% Tactel® Nylon, 49% Lycra®

如果是连体衣、衬衫或紧身裤,穿着时一次伸进一条腿。轻轻将服装拉上身。把服装拉起时要将胯部的开口对正。根据情况逐一扣上搭钩并/或拉上拉链,直到服装完全穿好。最后一步是拉起并调节肩带。

如果是胸罩或背心,把手臂逐一伸入袖孔或袖子。扣上前面的搭钩和搭扣并/或拉上拉链,一开始请使用中间一排或最舒适的位置。您可以通过调整来找出最舒适的位置。调整好前面的封口以后,将肩带调整到对称和最舒适的位置

如果是面罩,请将下巴放在颏兜中(位于垂直接缝上)。在额头后面约 2 英寸的头顶上,合上尼龙搭扣封条。合上颈后的尼龙搭扣封条。

如果是臂膀或小腿的束套,将其在最宽处拉开,然后把腿或手伸进去。沿着手臂或小腿轻轻向上拉,确保束套顺滑并在肢体上均匀拉伸

洗涤说明:

把里面翻出,和同色服装一道洗涤。请勿使用织物柔软剂或漂白剂。请勿干洗或熨烫。

储藏说明:

避免过热、过冷或过湿。远离大气污染物,例如内燃机的废气。建议的储藏条件是 4-29°C (40-85°F)。

要查看我们的退货规定,请访问 www.Marena.com 或致电 888-462-7362。

发布日期:2019 年 3 月 (IFU-001 Rev.00)