

oyzee

Před použitím dezinfikujte silikonové nástavce a nasadte je na zařízení. Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vyberte požadovanou úroveň sání.

1. Držte dítě ve vzpřímené nebo sedící poloze se vzpřímenou hlavou.
2. Zařízení umístěte do nosní dírky pod úhlem 45°.
3. Během provozu druhou rukou v intervalech uzavírejte druhou nosní dírku (po dobu 1-2 sekund).
4. Pro snadnější odsávání můžete před použitím nos nastříkat vhodným sprejem / olejem nebo na několik minut na nos položte vatou namočenou do teplé vody.

VLASTNOSTI:

- 2x silikonový nástavec (novorozenci, děti od 2 let)
- Materiál: silikon, ABS
- Vhodné pro: 0 – 10 let
- Hmotnost: 0,48 kg
- USB kabel pro nabíjení (adaptér není součástí balení)

Nástavce nepřevařujte. Očistěte je pod teplou vodou a podle potřeby dezinfikujte dezinfekčním prostředkem.

