




See reverse for English instructions.




 GENETICS

## Instructions d'écouvillon

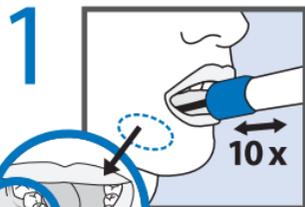


Ouvrir le paquet et enlever le dispositif de prélèvement sans toucher le bout en éponge. Introduire l'éponge le plus loin possible dans la bouche sans créer de gêne et frotter le long des gencives inférieures (voir l'image en gros plan) en procédant d'avant en arrière. Frotter délicatement les gencives 10 fois. Si possible, éviter de frotter les dents.

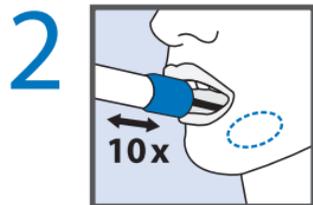

Répéter doucement le mouvement de frottement du côté opposé de la bouche le long des gencives inférieures 10 fois de plus.



Tenir le tube à la verticale pour empêcher le déversement du liquide stabilisateur qu'il contient. Dévisser le bouchon bleu du tube de prélèvement sans toucher l'éponge.

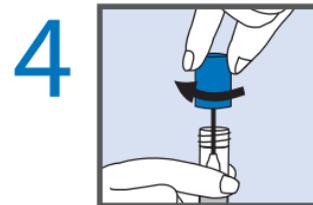

Retourner le bouchon, insérer l'éponge dans le tube et fermer hermétiquement le bouchon.



Retourner le tube bouché et le secouer 15 fois vigoureusement.

Instructions de prélèvement de l'échantillon