

SALT.

MONTURES OPTIQUES

(ACETATE, TITANE, TITANE-ACETATE)

MODE D'EMPLOI

Salt Optics, Inc. « SALT »

SALT.

SALT. Montures Optiques MODE D'EMPLOI

Coordonnées :

Web: <https://saltoptics.com/collections/optical>

Service Client: SERVICE@SALTOPTICS.COM

Téléphone États-Unis : +1 949 574 3800

Téléphone Europe : +33 4 93 84 24 29



Salt Optics, Inc.
1607 Monrovia Ave.
Costa Mesa, CA 92627
USA



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland

UK Responsible Person
MedEnvoy UK Limited
85, Great Portland Street
First Floor
London, W1W 7LT
United Kingdom



SALT.

Table des matières :

DESCRIPTION DU PRODUIT	3
UTILISATION PRÉVUE.....	3
INDICATIONS D'UTILISATION	3
BÉNÉFICE CLINIQUE ATTENDU.....	3
CONTRE-INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS.....	3
FONCTIONNEMENT DE BASE.....	3
PRÉVENTION ET SOINS.....	3
TRANSPORT ET STOCKAGE.....	3
GARANTIE.....	3
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS DANS L'ÉTIQUETAGE	4
ENTRETIEN ET RÉPARATION	5
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ	5

SALT.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les montures optiques SALT sont des montures de lunettes optiques fabriquées en acétate, en titane ou en une combinaison de ces matériaux. Les montures sont fournies avec des verres sans correction, conçues pour être retirées et remplacées par des verres de correction par un opticien ou un médecin agréé avant d'être utilisées par le patient.

UTILISATION PRÉVUE

Les montures optiques SALT sont un dispositif destiné à maintenir les verres de lunettes de correction portés par le patient pour corriger les erreurs de réfraction.

INDICATIONS D'UTILISATION

Les lunettes complètes sont utilisées pour corriger ou améliorer la vision des personnes atteintes de myopie, d'hypermétropie, de presbytie et / ou d'astigmatisme.

BÉNÉFICE CLINIQUE ATTENDU

Améliorer la fonction des yeux (vision).

CONTRE-INDICATIONS ET AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser comme lunettes de sécurité.



AVERTISSEMENT : Évitez les impacts importants.



AVERTISSEMENT : Un professionnel de la santé doit être consulté pour ajuster les montures au visage.

FONCTIONNEMENT DE BASE

1. Faites glisser les branches des montures de lunettes sur vos oreilles et abaissez doucement la monture sur votre nez.
2. Manipulez vos lunettes à deux mains pour réduire la tension sur les charnières.

PRÉVENTION ET SOINS

1. Utilisez un étui à lunettes.
2. Nettoyez vos lunettes régulièrement, toujours avec un chiffon en microfibre ou en coton de haute qualité.
3. Enlevez vos lunettes avant de dormir.
4. Enlevez vos lunettes lorsque vous pratiquez du sport.
5. Faites ajuster vos montures de lunettes au moins une fois par an.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, conservez vos lunettes dans leur étui souple ou rigide dans un endroit sec à une température comprise entre 10 et 40 degrés centigrades.

Pour un transport sûr, le produit doit être réemballé dans l'étui de transport à coque rigide fourni.

S'il s'avérait nécessaire de retourner le produit au fabricant, veuillez d'abord contacter le fabricant.

SALT.

EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS DANS L'ÉTIQUETAGE



Fabricant légal




Consultez le mode d'emploi électronique avant utilisation



Gardez au sec



Fragile, manipulez avec soin

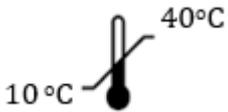

Limites de température de stockage/transport
10 à 40 °C



Représentant européen autorisé

SALT.

GARANTIE

Clients Nord-Américains :

- SALT Optics offre une garantie d'un an à compter de la date d'achat sur toutes ses montures. Les montures de lunettes pourront être réparées ou remplacées, après inspection, pour tout défaut de fabrication, à condition qu'aucun dommage ne puisse être attribué à une utilisation et une usure normales du produit. Les bris accidentels ou les verres rayés ne sont pas couverts par la garantie, mais ces réparations peuvent être effectuées moyennant des frais standard.
- Exigence de garantie :
 - Reçu de vente original ou preuve d'achat, incluant la date d'achat et les informations du revendeur.
 - Une explication du défaut rencontré ou de la façon dont la monture a été endommagée.
 - Vos coordonnées complètes, y compris les éléments suivants : nom, adresse, numéro de téléphone, ainsi que votre adresse e-mail.
 - Adresse de retour correcte
 - Frais de port payés en totalité. Nous n'acceptons pas les retours en paiement à la livraison (COD).
 - Tous les retours doivent être accompagnés d'un numéro d'autorisation de retour (AR). Veuillez contacter SALT Optics Inc. pour obtenir le numéro AR. Les colis sans numéro d'autorisation de retour seront retournés à l'expéditeur.

Clients Européens :

- Comme prévu par la loi, SALT offre une garantie de deux ans à compter de la date d'achat sur toutes ses montures. Les montures de lunettes pourront être remplacées, après inspection, pour tout défaut de fabrication, à condition qu'aucun dommage ne puisse être attribué à une utilisation et une usure normales du produit. Les bris accidentels ou les verres rayés ne sont pas couverts par la garantie.
- Veuillez contacter votre revendeur SALT. pour toute réclamation de garantie.
- Exigence de garantie :
 - Reçu de vente original ou preuve d'achat, incluant la date d'achat et les informations du revendeur.
 - Une explication du défaut rencontré ou de la façon dont la monture a été endommagée.

Pour tous les autres pays :

- Veuillez contacter SALT. directement.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

Pour plus d'informations sur l'entretien ou la réparation, veuillez contacter SALT Optics, Inc.

UE : +33 4 93 84 24 29

États-Unis : +1 949 574 3800

UE/États-Unis : RETURNS@SALTOPTICS.COM

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

La déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse <https://saltoptics.com>

SALT.

SALT Optics, Inc.	Numéro du document		Émission	1
	Titre	Montures optiques SALT – Mode d'emploi		

Titre du document	Montures optiques SALT – Mode d'emploi		
Numéro d'émission	1	Date d'émission	17 mars 2023

APPROBATIONS

Rôle	Nom	Poste	Date
Auteur	Marielle Lejcher	Consultant en réglementation	17 mars 2023
Approbateur	Jaysen Johnson	Contrôleur financier	17 mars 2023

DOSSIER DE MODIFICATION

Date de modification	Révision des documents	Pages concernées	Motif de la modification
12/03/2018	01	Toutes	Émission initiale du RDM