

# **SALT.**

## **OPTISCHE BRILLENFASSUNGEN**

(ACETAT, TITAN, TITAN-ACETAT)

## **GEBRAUCHSANWEISUNG**

Salt Optics, Inc. "SALT."

# SALT.

## SALT. optische Brillenfassungen GEBRAUCHSANWEISUNG

### Kontaktinformationen:

Web: <https://saltoptics.com/collections/optical>

Kundenservice: [SERVICE@SALTOPTICS.COM](mailto:SERVICE@SALTOPTICS.COM)

Telefon US: +1 949 574 3800

Telefon Europa: +33 4 93 84 24 29



**Salt Optics, Inc.**  
1607 Monrovia Ave.  
Costa Mesa, CA 92627  
USA



**MedEnvoy Global B.V.**  
Prinses Margrietplantsoen 33  
Suite 123  
2595 AM The Hague  
The Netherlands



**MedEnvoy Switzerland**  
Gotthardstrasse 28  
6302 Zug  
Switzerland

**UK Responsible Person**  
**MedEnvoy UK Limited**  
85, Great Portland Street  
First Floor  
London, W1W 7LT  
United Kingdom



# SALT.

## Inhaltsverzeichnis:

<b>PRODUKTBESCHREIBUNG.....</b>	<b>3</b>
<b>VERWENDUNGSZWECK.....</b>	<b>3</b>
<b>INDIKATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH.....</b>	<b>3</b>
<b>BEABSICHTIGTER KLINISCHER NUTZEN .....</b>	<b>3</b>
<b>KONTRAINDIKATIONEN UND WARNHINWEISE.....</b>	<b>3</b>
<b>GRUNDLEGENDE BEDIENUNG .....</b>	<b>3</b>
<b>PRÄVENTION UND PFLEGE .....</b>	<b>3</b>
<b>TRANSPORT UND LAGERUNG .....</b>	<b>3</b>
<b>ERKLÄRUNG DER SYMBOLE BEI DER KENNZEICHNUNG.....</b>	<b>4</b>
<b>GARANTIE.....</b>	<b>5</b>
<b>SERVICE UND REPARATUR.....</b>	<b>5</b>
<b>KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG .....</b>	<b>5</b>

# SALT.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

SALT. Fassungen sind optische Brillenfassungen, die aus Acetat, Titan oder einer Kombination davon hergestellt werden. Die Fassungen sind mit nicht verschreibungspflichtigen Gläsern versehen, die vor der Verwendung durch den Patienten von einem staatlich geprüften Augenoptiker oder Arzt entfernt und durch verschreibungspflichtige Gläser ersetzt werden müssen.

## VERWENDUNGSZWECK

Eine SALT. Brillenfassung ist eine Vorrichtung, die verschreibungspflichtige Gläser hält, und die von einem Patienten getragen wird um eine Fehlsichtigkeit zu korrigieren.

## INDIKATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH

Fertige Brillen werden zur Korrektur oder Verbesserung des Sehvermögens von Menschen mit Kurzsichtigkeit (Myopie), Weitsichtigkeit (Hyperopie), Alterssichtigkeit und/oder Astigmatismus verwendet.

## BEABSICHTIGTER KLINISCHER NUTZEN

Verbesserung des Sehvermögens

## KONTRAINDIKATIONEN UND WARNHINWEISE



**WARNUNG:** Nicht als Schutzbrille verwenden.



**WARNUNG:** Vermeiden Sie starke Stöße.



**WARNUNG:** Für die Anpassung der Brille an das Gesicht einen Fachmann/ Optiker konsultieren.

## GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

1. Schieben Sie die Bügel des Brillengestells über Ihre Ohren und setzen Sie das Gestell sanft auf Ihre Nase.
2. Fassen Sie Ihre Brille mit beiden Händen an, um die Belastung der Scharniere zu verringern.

## PRÄVENTION UND PFLEGE

1. Verwenden Sie ein Brillenetui.
2. Reinigen Sie Ihre Brille regelmäßig mit einem Mikrofasertuch oder Tuch aus hochwertiger Baumwolle.
3. Nehmen Sie Ihre Brille vor dem Schlafengehen ab.
4. Nehmen Sie Ihre Brille ab wenn Sie Sport treiben.
5. Lassen Sie Ihre Brille mindestens einmal im Jahr anpassen.

## TRANSPORT UND LAGERUNG

Bewahren Sie die Brille bei Nichtgebrauch in einem Stoff- oder Hartschalenetui an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 10 und 40 Grad Celsius auf.

**Für einen sicheren Transport sollte sich die Brille in dem mitgelieferten Hartschalenetui befinden.**

Kontaktieren Sie bitte zuerst den Hersteller falls es notwendig sein sollte die Brillenfassung an den Hersteller zurückzusenden.

# SALT.

## ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE BEI DER KENNZEICHNUNG



Legaler Hersteller




Konsultieren Sie die elektronische Gebrauchsanweisung



Trocken halten



Zerbrechlich, mit Vorsicht handhaben

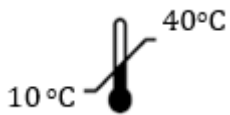

Grenzwerte für die Lager-/Transporttemperatur  
10 bis 40 °C



Autorisierte Europäische Vertretung

# SALT.

## GARANTIE

### Kunden Nordamerika:

- SALT. gewährt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum auf alle Brillenfassungen. Brillenfassungen können nach Inspektion auf Fabrikationsfehler repariert oder ersetzt werden, sofern der Schaden/Defekt nicht auf normale Abnutzung zurückzuführen ist. Versehentlicher Bruch oder zerkratzte Gläser fallen nicht unter Garantie, aber solche Reparaturen können gegen eine Standardgebühr durchgeführt werden.
- Garantieanforderung:
  - Original Kaufbeleg oder Kaufnachweis, einschließlich Kaufdatum und Händlerinformation
  - Eine Erklärung des Defekts oder wie die Brillenfassung beschädigt wurde.
  - Ihre vollständigen Kontaktdaten, einschließlich Name, Adresse, Telefonnummer sowie Ihre e-mail-Adresse.
  - Rücksendeadresse
  - Der Versand muß vollständig bezahlt sein. Wir akzeptieren keine Rücksendungen auf Nachnahme
  - Alle Rücksendungen müssen mit einer Rücksendegenehmigungsnummer (RA) versehen sein. Bitte kontaktieren Sie SALT. um eine RA-Nummer zu erhalten. Pakete ohne Rücksendenummer werden an den Absender zurückgeschickt.

### Kunden Europa:

- SALT. gewährt in Europa, wie gesetzlich vorgeschrieben, eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum auf alle Brillenfassungen. Brillenfassungen können nach Inspektion auf Fabrikationsfehler ersetzt werden, sofern der Schaden/Defekt nicht auf normale Abnutzung zurückzuführen ist. Versehentlicher Bruch oder zerkratzte Gläser fallen nicht unter Garantie.
- Bitte wenden Sie sich bei einem Garantiefall an einen SALT. Händler
- Garantieanforderung:
  - Original Kaufbeleg oder Kaufnachweis, einschließlich Kaufdatum und Händlerinformation
  - Eine Erklärung des Defekts oder wie die Brillenfassung beschädigt wurde.

### Für alle anderen Länder:

- Bitte kontaktieren Sie SALT.

## SERVICE UND REPARATUR

Bitte wenden Sie sich an SALT. falls Sie Information bezüglich Wartung oder Reparatur benötigen

EU: +33 4 93 84 24 29

USA: +1 949 574 3800

EU/USA: [RETURNS@SALTOPTICS.COM](mailto:RETURNS@SALTOPTICS.COM)

## KONFORMITÄTSBESCHEINIGUNG

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter <https://saltoptics.com>

# SALT.

SALT Optics, Inc.	Dokumentennummer		Ausgabe	1
	<b>Titel</b>	SALT. Optische Brillenfassungen – Gebrauchsanweisung		

<b>Titel des Dokuments</b>	SALT. Optische Brillenfassungen – Gebrauchsanweisung		
<b>Ausgabe-Nr.</b>	1	<b>Ausgabedatum</b>	17 März 2023

GENEHMIGUNGEN			
Rolle	Name	Position	Datum
Autorin	Marielle Lejcher	Regulierungsberaterin	17 März 2023
Genehmigender	Jaysen Johnson	Finanzcontroller	17 März 2023

ÄNDERUNGSPROTOKOLL			
Datum der Änderung	Dokumenten-überarbeitung	Betroffene Seiten	Grund für die Änderung
12/03/2018	01	Alle	Erste MDR-Veröffentlichung